

Reprocessadora Quality-1



“Garantizamos soluciones que aumentan la calidad de vida de pacientes con insuficiencia renal”.





SAUBERN



Etapas del proceso



Limpia el dializador

Utilizando chorros de agua (consumo de aproximadamente 4L de agua por reprocesamiento), ultrafiltración reversa con ácido peracético y su exclusivo sistema de vibración.

1

Mide la imprimación

Realiza la medición automática del volumen total interno de las fibras (de 20 a 170ml (con un margen de error de ± 2 ml. Dializador con caída mayor que el 20% de la imprimación tendrá su ciclo de reprocesamiento interrumpido y se orientará que se deseché.

2

Prueba de integridad de las fibras

Realiza la prueba de fuga de presión de las fibras del dializador. Caída de presión superior al límite establecido, tendrá su ciclo de reprocesamiento interrumpido y se orientará el desecho.

3


Llenado del dializador con ácido peracético

Garantiza el llenado completo de las cámaras interna y externa del dializador.

4

Reprocessadora Quality - 1

10
MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS

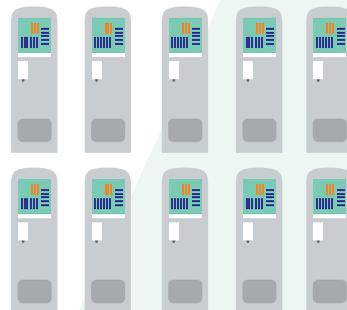


ECONOMÍA

Con Quality-1, la clínica está autorizada a reutilizar el dializador por hasta 20 veces, representando una economía de hasta 500 diálisis/año para cada 100 pacientes.



ESTANDARIZACIÓN

Dializador nuevo o antiguo, la calidad de reprocesamiento será siempre la misma y las etapas demostradas en la pantalla de Quality-1.

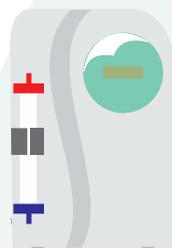

1 REPROCESSADORA



1 HORA Y 40 MINUTOS
REPROCESAMIENTO
10 CAPILARES

RESULTADO CONFIABLE

El principal parámetro que determina la eliminación del dializador es la medición de la imprimación. Con Quality-1 el margen de error es mínimo ($\pm 2\text{mm}$) evitando falsos resultados.



Dimensiones

Tensión de alimentación	127 V ou 220 V (Bivolt Manual)
Potencia (VA)	275 VA
Dimensiones	(L) 28 cm (P) 48 cm (A) 41 cm
Peso (Kg)	20,8 Kg
Alarmas	Visual (pantalla de cristal líquido) y sonora
Idioma de la pantalla	Portugués / Inglés / Español
Menú	Reprocesar Convencional Reprocesar alto Bujo Preparar máquina Desinfectar máquina
Producto químico	Ácido Peracético diluido al 0,2% (solución esterilizante)





SAUBERN MÉDICA

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II - 87307-799
CEP. 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

Teléfono: (44) 3529-1050
vendas@saubern.com.br
www.saubern.com.br